



## SD CHECK IHLY / Ultramalá autolanceta

- Pre pohodlný odber veľmi malej kvapky krvi ultratenkou ihlou.
- Pred odberom si starostlivo umyte ruky mydlom a teplou vodou a dôkladne ich osušte.
- Vhodné miesto pre odber je vnútorná strana druhého alebo tretieho prstu. Prst pred odberom stlačte, zlepší sa prietok krvi.

### **Návod na použitie:**

1. Miernym zatlačením do strany odstráňte kryt z tela autolancety.
2. Zatlačte novú ihlu do držiaka autolancety tak, aby zostala zatlačená vo vnútri v stabilnej pozícii – nemožno ju vrátiť späť.
3. Otočením odstráňte čiapočku ihly – dôjde k obnaženiu ihly.
4. Nasuňte späť kryt na telo autolancety.
5. Špičku krytu autolancety pritlačte na miesto odberu a stlačte koniec autolancety na osi, tlakom k odberovému miestu.
6. Po odbere vzorky krvi odstráňte kryt lancety. Na použitú ihlu nasuňte späť ochrannú čiapočku a ihlu vyberte miernym ťahom von. Použitú ihlu zlikvidujte.

### **Pre vašu BEZPEČNOSŤ – Dôležité UPOZORNENIA!**

- **Lancety (ihličky) sú určené len pre jedno použitie (z hygienických dôvodov).**
- **Zachádzajte s odberovým perom opatrne, nemierte ním do oka alebo na jazyk. Tiež nerealizujte vpich na mieste, kde máte zranenie alebo infekciu.**
- **Uchovávajúce odberové pero a lancety mimo dosah detí.**
- Aby nedochádzalo k vystaveniu zariadenia vplyvom patogénnych mikroorganizmov, nikdy nezdieľajte odberové pero/autolancetu s iným užívateľom. Spoločné používanie tohto zariadenia môže viesť k infekcii prenášanej krvi.
- SD Lanceta/ihlička je určená len pre jedno použitie (ONLY SINGLE USE). Nikdy ju nepoužívajte opakovane.
- SD Lancety/ihličky nepoužívajte pokiaľ majú prešlú expiračnú dobu (viď dátum exp. na obale). V takom prípade zakúpte nové balenie.
- SD Lancetu/ihličku vždy zakrývajte ochrannou rukavicou a jej likvidáciu realizujte podľa pokynov vášho lekára.
- SD Lancety/ihličky uschovávajúce pred deťmi. Hrot lancety je ostrý a nebezpečný.
- SD Autolancetu/odberové pero nepoužívajte na iné účely ako je odber krvi.
- O spôsobe odberu krvi sa poraďte so svojim lekárom alebo so skúseným zdravotným pracovníkom.
- Pred meraním obsahu cukru v krvi si dôsledne prečítajte návod na použitie vášho merača krvnej glukózy.

**Výrobca:** Beijing Ruicheng Medical Supplies Co.,Ltd., No.558 Zhangzikou, Yangsong Town, Huairou District, 101400 Beijing, China

**Zástupca pre EU:** Lotus NL B.V., Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands

**Distribútor s SR:** CELIMED, s.r.o., Pri majeri 22, 831 06 Bratislava, tel.:02 / 4487 2010

**CE 0197**