



## SD EZI pipeta 35 uL (25 ks v balení) - nesterilná

### Návod na použitie

#### **Pred začatím:**

1. Skontrolujte aké množstvo krvnej vzorky potrebujete.
2. Skontrolujte či dĺžka kapiláry bude vyhovovať vašim potrebám.
3. Skontrolujte stav pipety.

#### **Ako pipetu používať:**

1. Použitím lancety pichnete do prsta a vytlačte primerané množstvo krvi.
2. Priložte pipetu k vzorke krvi a opatrne naberte krv do pipety.
3. Vytlačte vzorku krvi do testovacieho zariadenia stlačením konca pipety.
4. Zlikvidujte pipetu na určenom mieste.

#### **Bezpečnostné upozornenie:**

1. Použitá STANDARD Ezi Tube pipeta môže spôsobiť infekciu. Prosím zlikvidujte ju na určenom mieste.
2. Dajte pozor pri odoberaní vzorky krvi na bubliny. Vzduchové bubliny vo vzorke krvi môžu nepriaznivo ovplyvniť množstvo krvi vo vzorke.
3. Ak je pipeta dlhšie otvorená pri izbovej teplote, použite prosím novú pipetu.
4. Pri nanášaní vzorky nezabudnite zakryť otvor podávača.

**Výrobca:** SD Biosensor, Inc., C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA

**Zástupca pre EU:** MT Promedt Consulting GmbH, Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany

**Distribútor s SR:** CELIMED, s.r.o., Pri majeri 22, 831 06 Bratislava, tel.: 02 / 4487 2010

